

RECOMMANDATIONS de BASE pour une Instrumentation en INOX

Il est nécessaire de nettoyer un instrument neuf avant de procéder à sa première stérilisation ou à sa première désinfection.

Le nettoyage doit être particulièrement attentif, car les dispositifs médicaux neufs ou réparés sont recouverts d'une couche d'huile qu'il faut impérativement éliminer avant de réaliser la stérilisation. Sinon celle-ci ne serait pas efficace.

À ce jour, le nettoyage peut être effectué de deux manières :

- En laveur désinfecteur conforme à la norme européenne EN ISO 15883-2
- Par nettoyage manuel (le nettoyage manuel n'étant pas une procédure reproductible, il est préférable d'utiliser un laveur désinfecteur pour l'étape du nettoyage.)

- Manipuler les instruments de chirurgie avec soin, tout au long des différentes étapes
- Nettoyer très soigneusement les Instruments neufs avant la première utilisation, afin de les débarrasser de toutes traces de graisse résiduelle dues à la fabrication, sinon vous observerez des auréoles jaunâtres sur l'inox & une oxydation de surface toujours possible
- Traiter à part les instruments de microchirurgie
- Essuyer minutieusement les instruments en contact avec des produits corrosifs
- Respecter scrupuleusement le mode d'emploi fourni par les fabricants d'équipement (machine à laver, machines à ultrasons, autoclaves)
- Tremper les instruments souillés par des matières organiques dans des solutions pré désinfectantes en respectant les temps de trempage
- Positionner correctement, sans surcharge, les instruments de façon à éviter les zones d'ombre
- Ouvrir les instruments à articulation pour la pré désinfection et le nettoyage sinon vous observerez des auréoles jaunâtres sur l'inox & une oxydation de surface toujours possible

- Proscrire l'utilisation de brosses métalliques et de tampons à récurer qui rayent l'acier en surface
- Utiliser des produits à base d'acide phosphorique ou citrique pour redonner l'éclat du neuf aux instruments en Inox ternis
- Rincer minutieusement à l'eau (si possible déminéralisée) après la pré désinfection et le nettoyage, afin de bien neutraliser les produits utilisés
- Procéder au contrôle de propreté et de bon fonctionnement des instruments
- Trier et retraiter si besoin
- Appliquer des produits lubrifiants adéquats sur les articulations
- Choisir le conditionnement adapté aux instruments pour la stérilisation
- Stériliser les instruments articulés en position ouverte, ou ne fermer qu'au premier cran de crémaillère les instruments qui comportent ce dispositif

**LA STÉRILISATION NE REMPLACE
NI LA PRÉ-DÉSINFECTION, NI LE NETTOYAGE
ON NE STÉRILISE BIEN QUE CE QUI EST PROPRE**



N'hésitez pas à nous contacter :

92 cours Lafayette (Mamaworks)
69003 Lyon | France
CS 53515 69489 Lyon Cedex 3
Tel: 04 26 78 74 83
E-Mail: commande@meisinger.fr
Internet: www.meisinger.fr

